



Références Hologic : Flacons : 70098- 002

Brosses Cervex: 70671-001


Après pose du spéculum et repérage du col utérin :



- 1. Recueillir** un échantillon adéquat de la zone de utérin à l'aide de la brosse cervex (manchon vert).

jonction du col

Introduire profondément les poils de la partie centrale de la brosse dans le canal endo-cervical afin de permettre aux poils plus courts d'entrer en contact étroit avec la région exo-cervicale. Pousser doucement puis tourner 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre

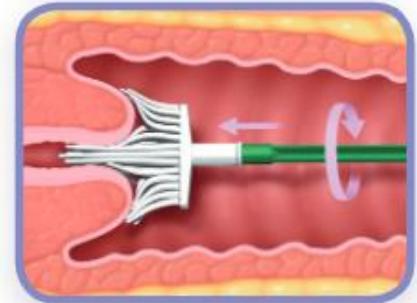

- 2. Rincer** la brosse dans le flacon contenant la solution de conservation (PreservCyt®) en la pressant 10 fois contre le fond du flacon en forçant les poils à se séparer.

Agiter la brosse vigoureusement pour détacher le reste des cellules recueillies. Jeter la brosse.



**⚠ NE PAS LAISSER LA BROSSE DANS LE FLACON**

- 3. Visser** le couvercle hermétiquement

Le repère du bouchon et celui du flacon doivent s'aligner ou se chevaucher légèrement.



- 4. Identifier** le flacon avec une étiquette patient.

- i** Retirer délicatement tout excès de mucus avant le prélèvement.
- i** Ne pas mettre d'étiquette sur la partie sans étiquette du flacon d'échantillon afin que le contenu soit visible.
- i** NE JAMAIS utiliser une spatule en bois.
- i** NE PAS utiliser de lubrifiant.
- i** NE PAS visser trop fort le capuchon sur le flacon.
- i** NE PAS utiliser de flacons périmés.